


New products!

Alphatite Implant 新製品情報

(MJガイドシステム用ドリル)

αドリルスタートS/αドリルスタートM

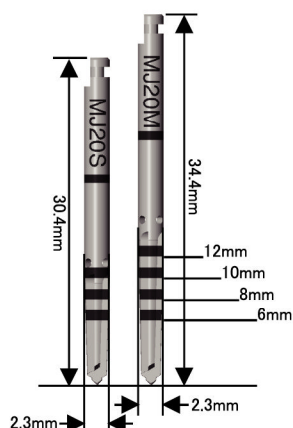


【コンセプト】

- ① サージカルガイドはメーカーに限らず、シミュレーションと模型に対して適合するように作られています。そのため、実際の口腔内で適切な位置にインプラントを埋入できるかどうかは、保証されているわけではありません。初めにこのドリルで穿孔し、ドリリング方向を確認することで、サージカルガイドが自らの策定した計画と合致するかどうかを、低侵襲で確認することが可能です。計画通りであればそのままオペを続行、計画と異なるようであれば、オペの中断またはフリーハンドでのオペの選択を行う必要があります。
- ② 骨質が極めて柔らかい場合や、SB33**といった細いインプラントにガイドを適用させる場合に使用することができます。
- ③ このドリルはガイドドサージュリーのみでなく、通常手術時のパイロットドリルとしてもご使用いただけます。

左図左：αドリルスタート S（スタートドリル R8 と同じ全長）
左図右：αドリルスタート M（スタートドリル R12 と同じ全長）


【使用方法】

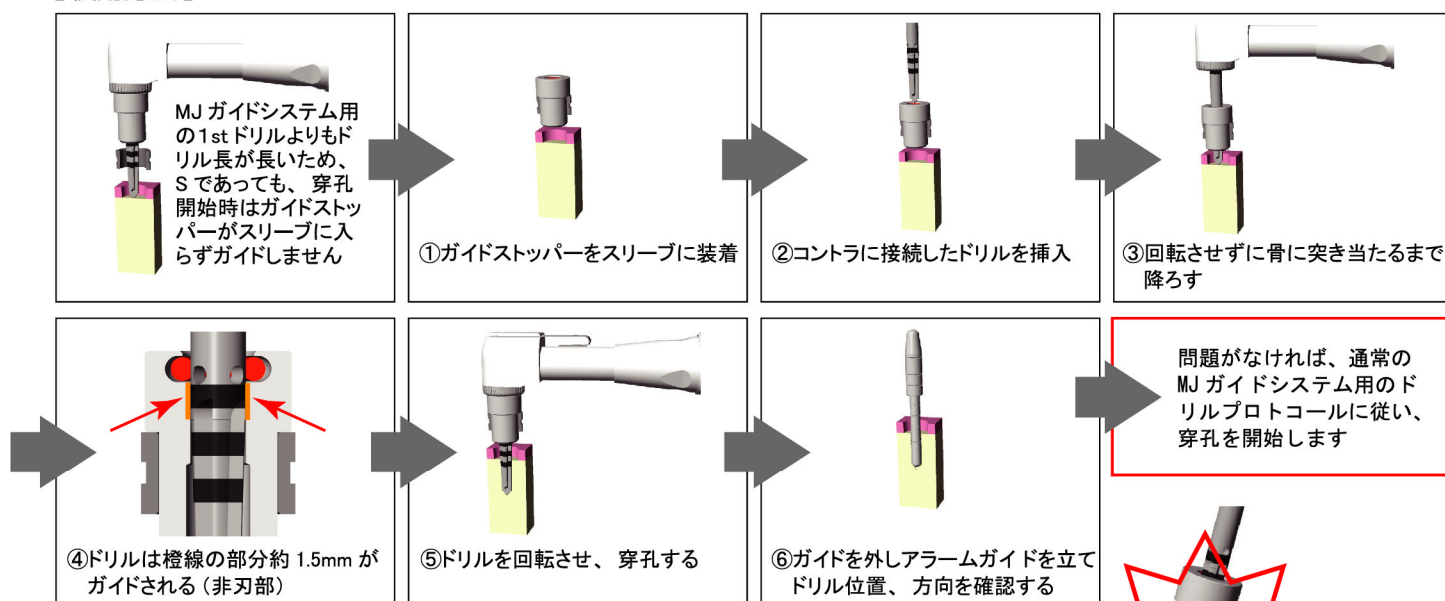

製品名	αドリルスタートS/M
製品コード	DD116/DD117
材質	ステンレス

【注意事項】

- ・ドリル深度はMJガイドシステム術式マニュアルをご参照ください。(R8、R12と同じ深度)
- ・ドリルに通したガイドストッパーは斜め方向に抜き取った場合、ドリルから抜け落ちる可能性があります。(口腔内落下にご注意ください。)
- ・αドリルスタートMは、αドリルスタートSの後に使用してください。

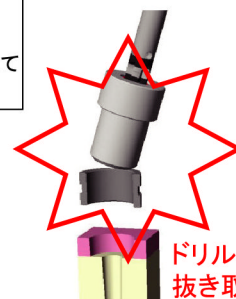

ドリルは垂直方向に抜き取ってください。抜き取り時、ガイドストッパーの口腔内への落下には十分ご注意ください！

詳しくはケンテックまでお問合せ下さい。

<製造販売元>



ケンテック株式会社

東京都新宿区早稲田南町 52-2
電話 03-5155-2596 FAX 03-5155-2598
URL <http://www.alpha-kentec.co.jp/>

アルファタイトインプラント

医療機器承認番号 22000BZX00172000
医療機器届出番号 13B1X10033000001
13B1X10033000002
13B1X10033000003