


アルファシステム (PP印象パーツ) の操作方法

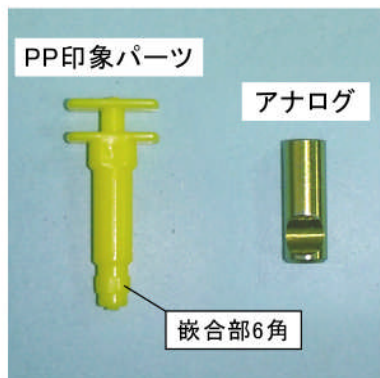

＜PP印象パーツについて＞

- ・クローズド印象を行い、口腔内のフィクスチャー位置を作業模型上に再現させます。
- ・SB1嵌合とSS1嵌合のフィクスチャーに共通で取り付け出来ます。但しアナログは対象フィクスチャーに合ったものを選択して下さい。


＜対象フィクスチャーとアナログについて＞

- ・TF3708～3714、TF4008～4014、TF4308～4312
- ・F3708～3712、F4008～4012
- ・SB3708～3714、SB4008～4012
- ・SS3308～3312、SS3708～SS3712

→ SB1アナログ

→ SS1アナログ

その他の嵌合サイズの販売は未定です。

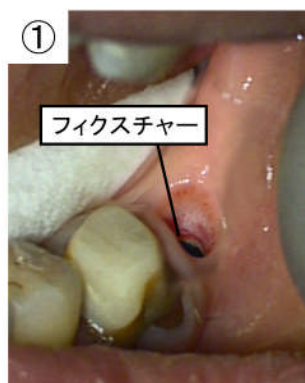


① 下顎6番に埋入されたフィクスチャーの印象採得を行います。



② PP印象パーツをフィクスチャーに取り付け、上から押さえ、しっかり嵌め込みます。

注意！

PP印象パーツの嵌合部六角と口腔内のフィクスチャー嵌合部六角を正確に合わせ嵌め込んで下さい。

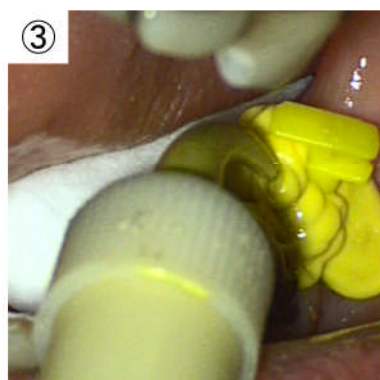

③ PP印象パーツをシリコン印象材でしっかり覆い、印象採得を行います。

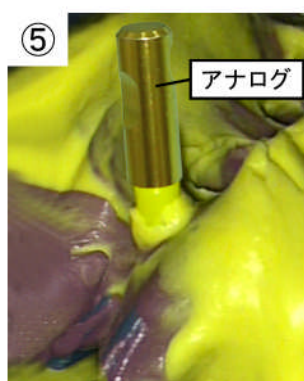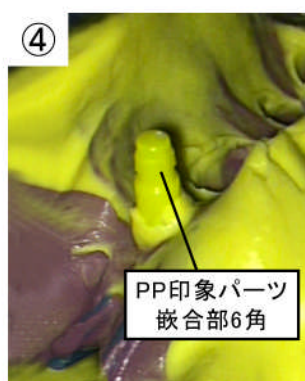

④ 印象材内に取り込まれたPP印象パーツです。

⑤ PP印象パーツにアナログをしっかり嵌め込み、石膏を流し作業模型を製作します。

注意！

PP印象パーツの嵌合部六角とアナログの嵌合部六角を正確に合わせ嵌め込んで下さい。